


CELLKICK

Nogier Frequencies

CellKick Low Level Laser Topline

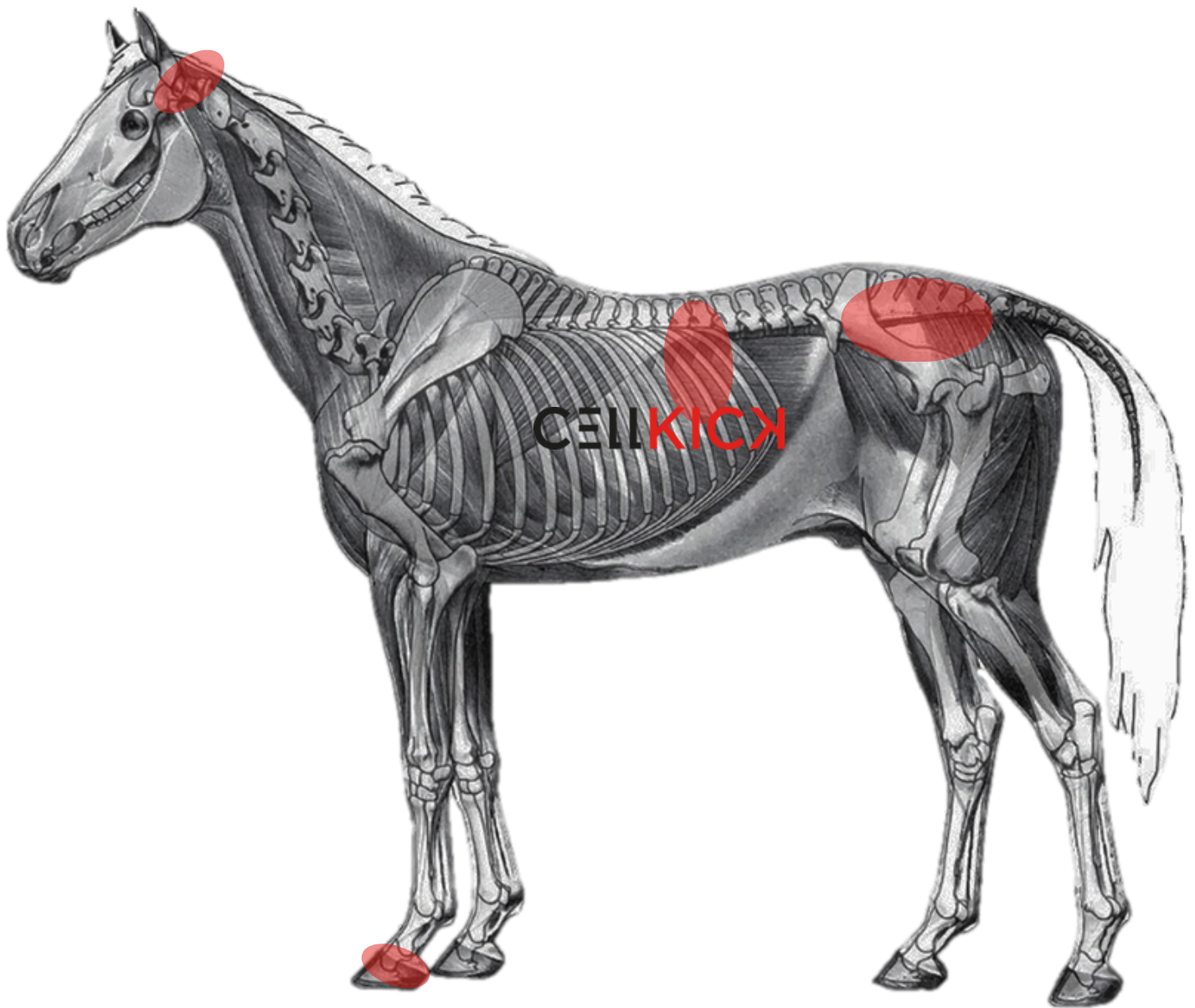

Inhoudsopgave

- Kaart # N1 Darmen
- Kaart # N2 Lever
- Kaart # N3 Hoefbevangenheid
- Kaart # N4 Stress
- Kaart # N5 Longen
- Kaart # N6 Headshaken
- Kaart # N7 Hormoonbalans

CELLKICK

Ben je op zoek naar een kaart voor een bepaalde aandoening?
Neem even contact op via info@cellkick.nl met ons zodat we die voor jou kunnen maken.


Darmen

Functioneren de darmen van jouw paard niet optimaal? Dan kan het zijn dat de darmen opnieuw in de juiste frequentie gebracht moeten worden. Als je alles gedaan hebt en het hele management is op orde, dan kun je hier grote resultaten mee boeken.

Het behandelen

Je zet de Low Level Laser Topline op 584 Hz en plaatst de kop van de Topline op de aangegeven locatie op de afbeelding. Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer.

De darmen behelzen een zeer groot gebied in de buikholte van het paard. Je zal niet snel op een verkeerde plek behandelen.

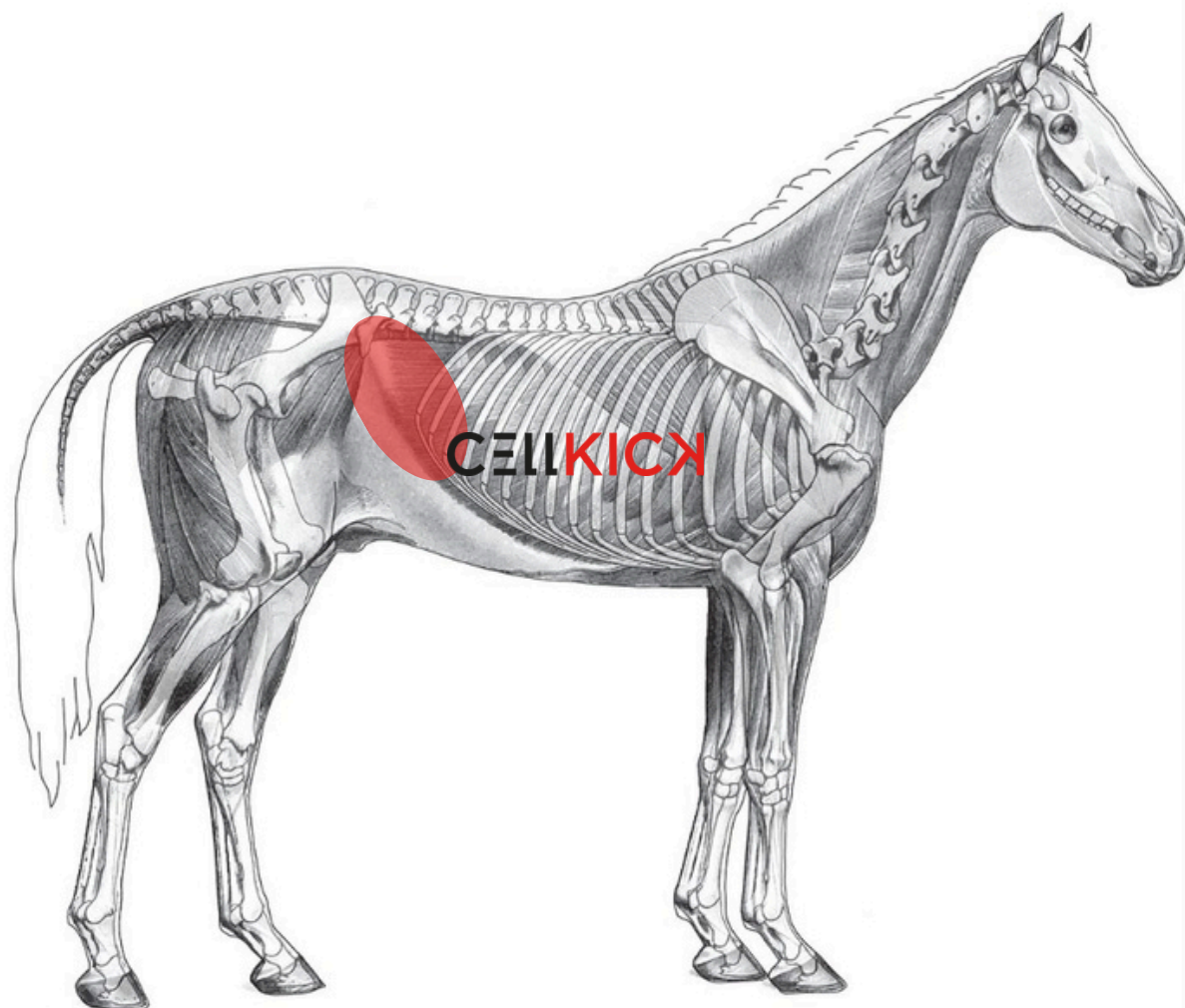


Lever

De lever helpt het lichaam onder andere met ontgiften. Na ziekte, medicijn gebruik of een stressvolle periode, kan het een goed idee zijn de lever een handje te helpen weer in de juiste frequentie te komen.

Het behandelen

Je zet de Low Level Laser Topline op 584 Hz en plaatst de kop van de Topline op de aangegeven locatie op de afbeelding. Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer.

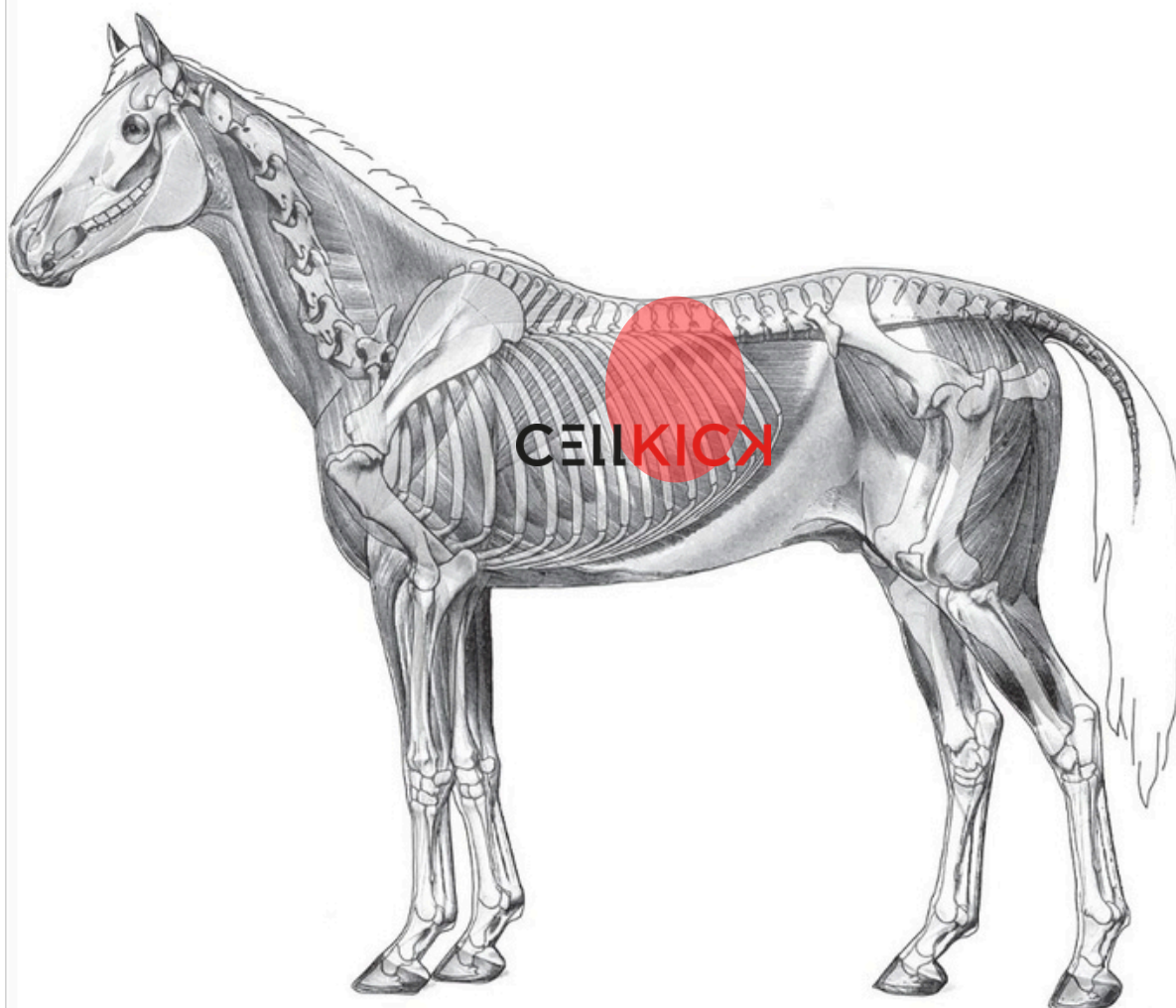


Hoefbevangenheid

De Low Level Laser Topline kun je ondersteunend inzetten wanneer een paard hoefbevangen is. Door de hoeven te voorzien van rood met infrarood licht in combinatie met de Nogier frequenties bied je direct pijnverlichting, daarnaast zorg je voor een verbeterde doorbloeding in de hoof waardoor de afvalstoffen makkelijker afgevoerd worden.

Het behandelen

Je zet de Low Level Laser Topline op 1168 Hz en plaatst de kop van de Topline op de kroonrand van de hoof. Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer.

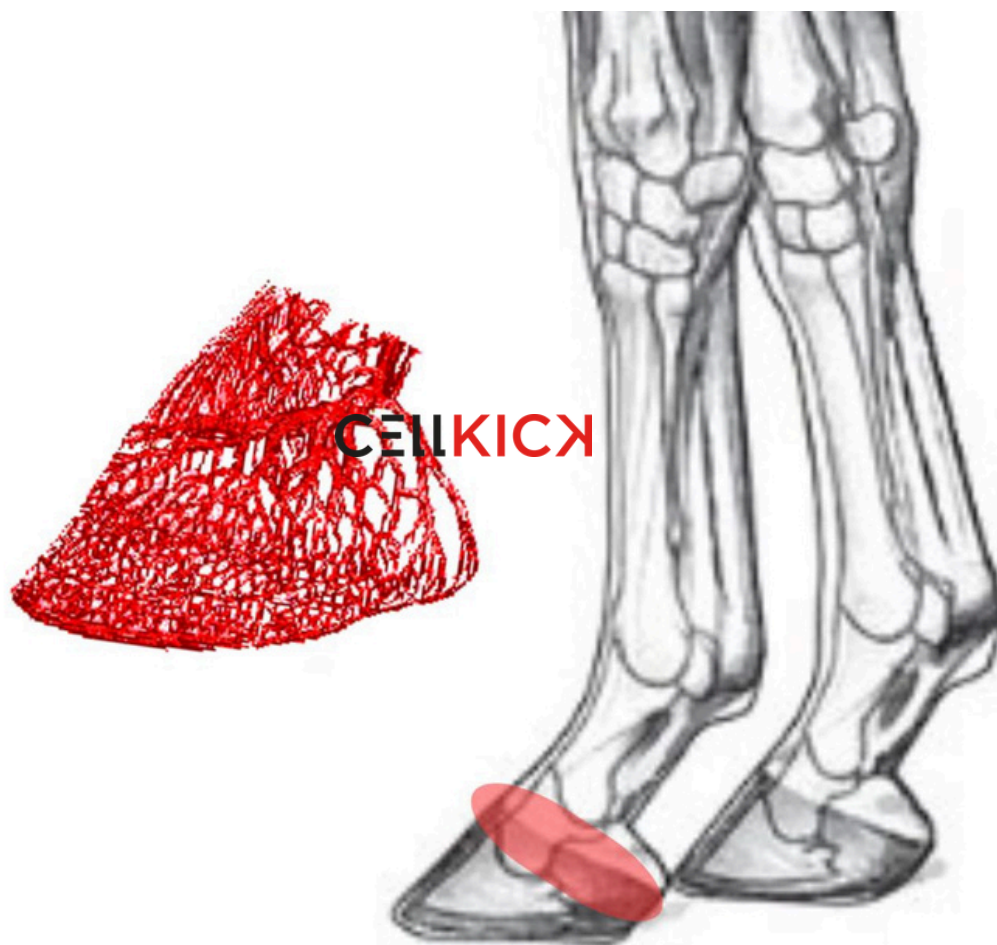


Stress

Hiermee kun je paarden goed ondersteunen die veel stress ervaren. Paarden die moeite hebben om rust te pakken en voornamelijk 'aan' staan. Constant willen wegrennen/vluchten alles eng vinden. Paarden die altijd alles in de gaten moeten houden, kunnen op deze manier meer rust gaan vinden. Deze behandeling zorgt ervoor dat er meer balans komt tussen het sympathische en parasympathische zenuwstelsel.

Het behandelen

Je zet de Low Level Laser Topline op 2336 Hz en plaatst de kop van de Topline op het achterhoofd van het paard, achter de oren. Dit is de locatie waar ook het kopstuk van een halster of hoofdstel ligt.

Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer.

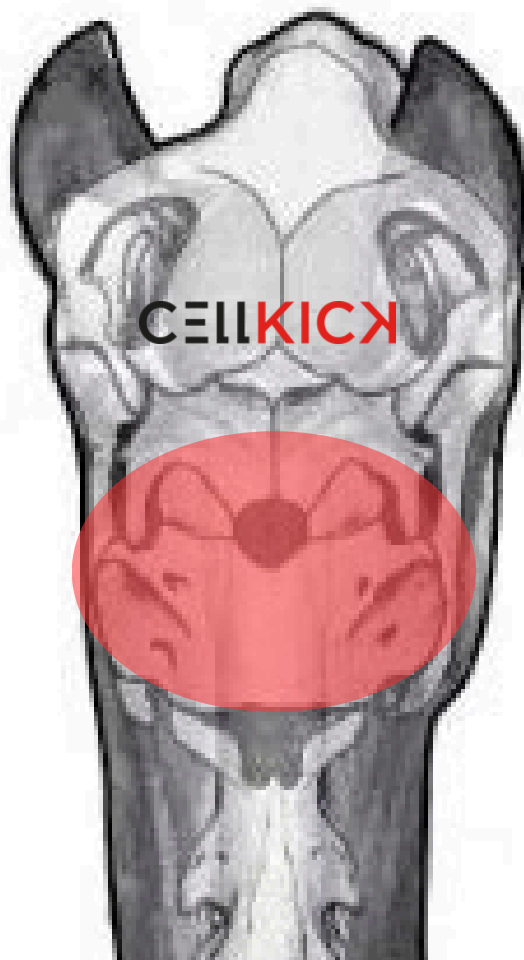



Longen

Is jouw paard gevoelig op de longen? Sluit dan eerst uit of er sprake is van een allergie of ziekte. Zorg voor optimale leefomstandigheden en goed stofvrij ruwvoer. In geval van ziekte altijd de dierenarts consulteren. Naast deze middelen kun je de Low Level Laser Topline inzetten om de frequentie van de cellen weer gezond te maken.

Het behandelen

Je zet de Low Level Laser Topline op 584 Hz en plaatst de kop van de Topline op de locaties op de afbeeldingen.

Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer, per locatie.

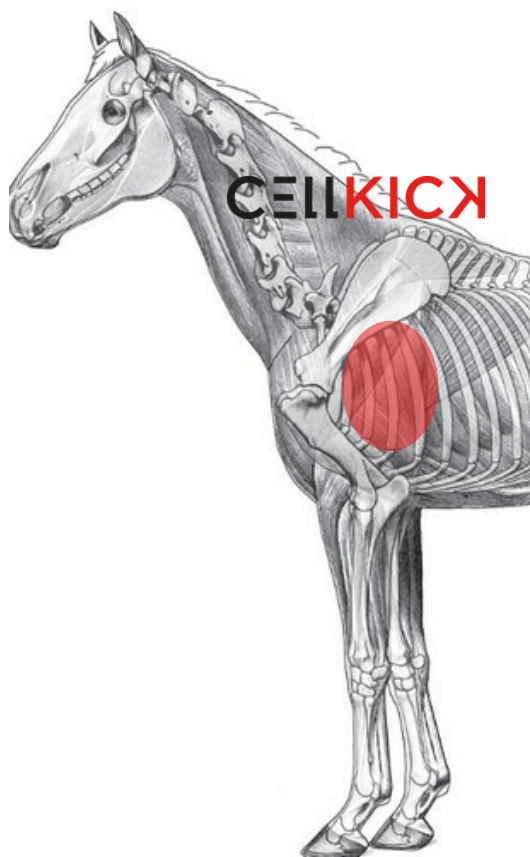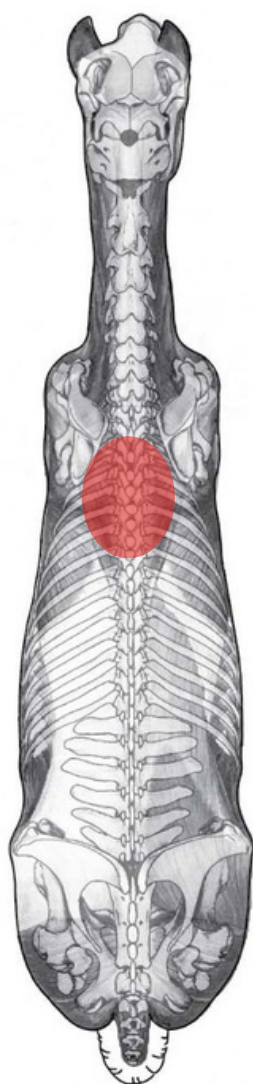

Headshaken


Bij paarden die headshaken of zeer gevoelig zijn bij aanraken van het hoofd kan deze behandeling heel prettig zijn. Ook paarden die standaard hun hoofd wegdraaien wanneer je ze wilt aaien, of niet aangeraakt willen worden bij de oren.

Het behandelen

Je zet de Low Level Laser Topline op 1168 Hz en plaatst de kop van de Topline op de locaties op de afbeeldingen.


Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer, per locatie.

Achterhoofd, achter de oren. Dit is de plek waar het kopstuk van halster of hoofdstel ligt

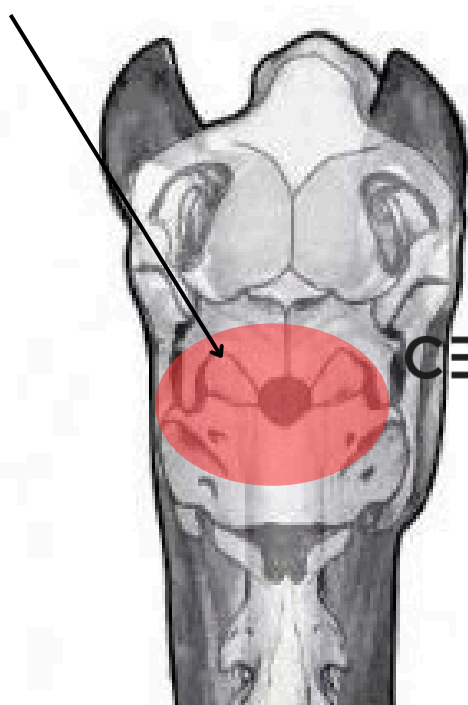

Op het kaakgewricht, beide kanten van het hoofd

Het tongbeen: tussen de 2 kaakhelften in

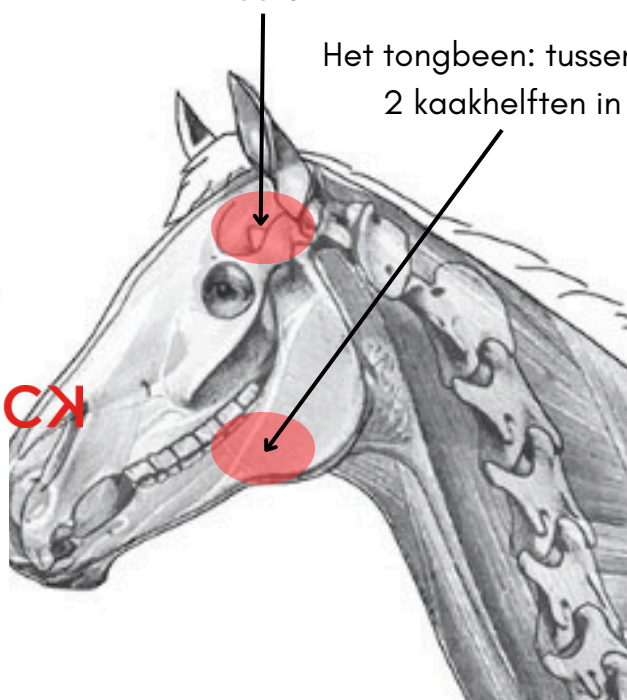

Hormoonbalans


Paarden die last hebben van hormonale schommelingen kun je een handje helpen door te behandelen met de Nogier frequenties.

Het behandelen

Je zet de Low Level Laser Topline op 73 Hz en plaatst de kop van de Topline op de locatie op de afbeelding.

Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer.

Achterhoofd, achter de oren. Dit is de plek waar het kopstuk van halster of hoofdstel ligt

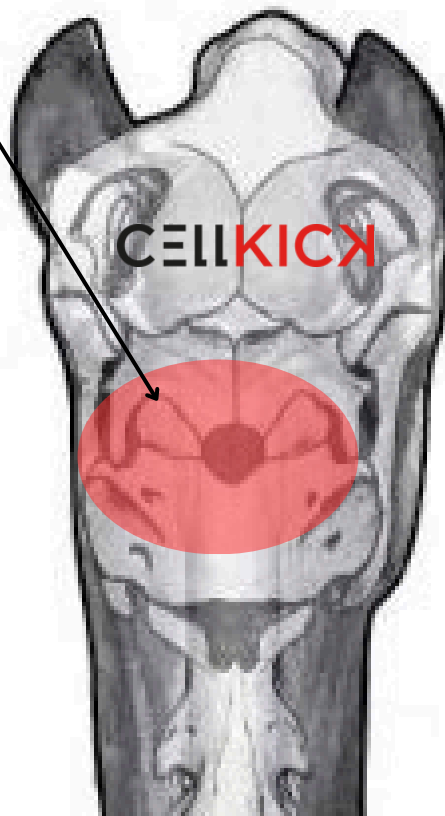

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features 20 evenly spaced horizontal red lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.



www.cellkick.nl
info@cellkick.nl