


CELLKICK

Nogier Frequencies

CellKick Low Level Laser Topline

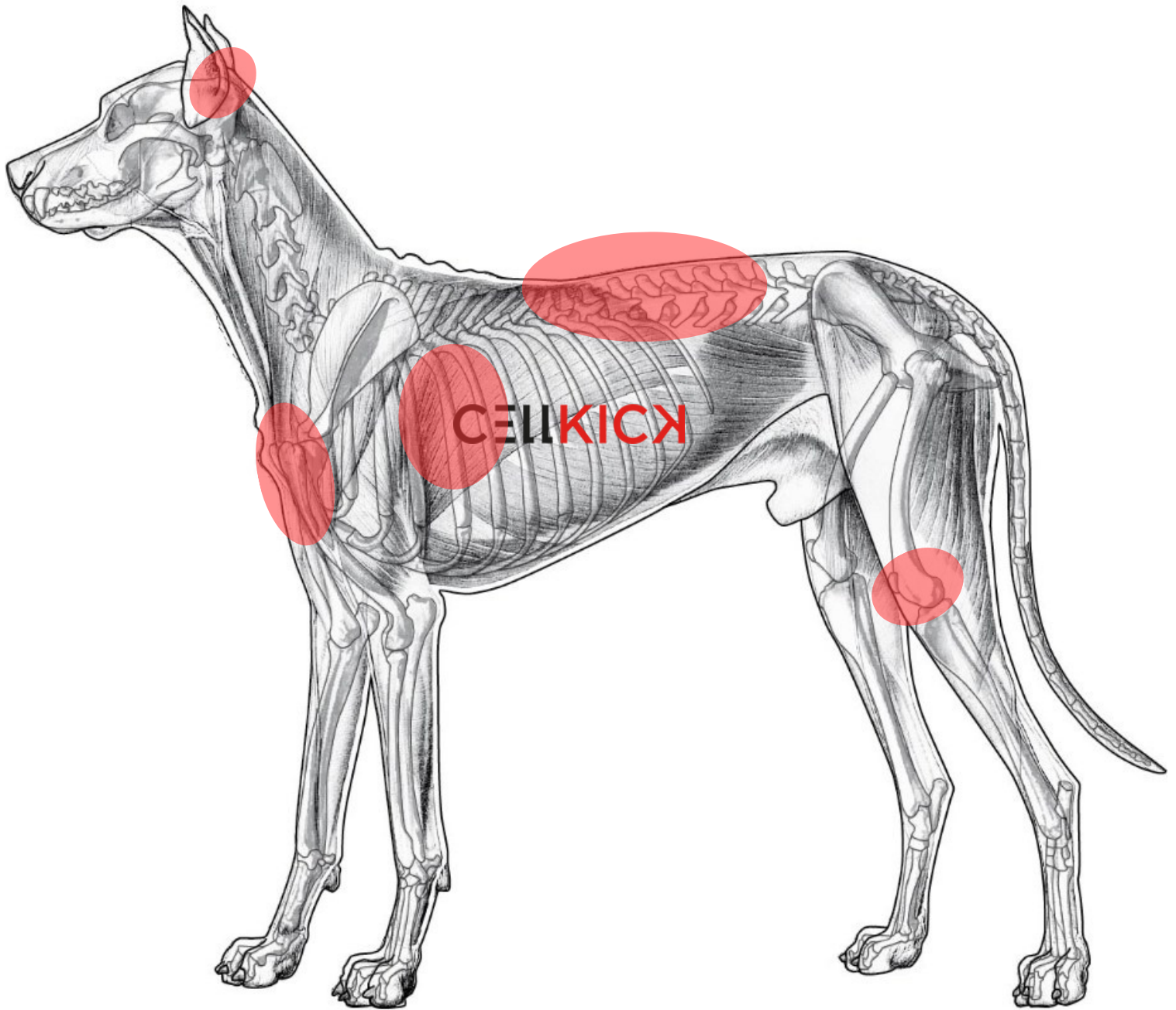

Inhoudsopgave

- Kaart # N1 Darmen
- Kaart # N2 Lever
- Kaart # N3 Spondylose
- Kaart # N4 Stress
- Kaart # N5 Longen
- Kaart # N6 Hormoonbalans
- Kaart # N7 Hotspots
- Kaart # N8 Oorontsteking

CELLKICK


Ben je op zoek naar een kaart voor een bepaalde aandoening?
Neem even contact op via info@cellkick.nl met ons zodat we die voor jou kunnen maken.

Darmen

Heeft jouw hond gevoelige darmen? Zachte ontlasting, jeuk, huidproblemen, terugkerende oorontstekingen. Het kan allemaal vanuit een darm onbalans veroorzaakt worden. Heb jij alles onder de loep genomen mbt het management? Dan kan het helpen de darmen opnieuw in de juiste frequentie te brengen.

Het behandelen

Je zet de CellKick Topline op 584 Hz en plaatst de kop van de Topline op de aangegeven locatie op de afbeelding. Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer.

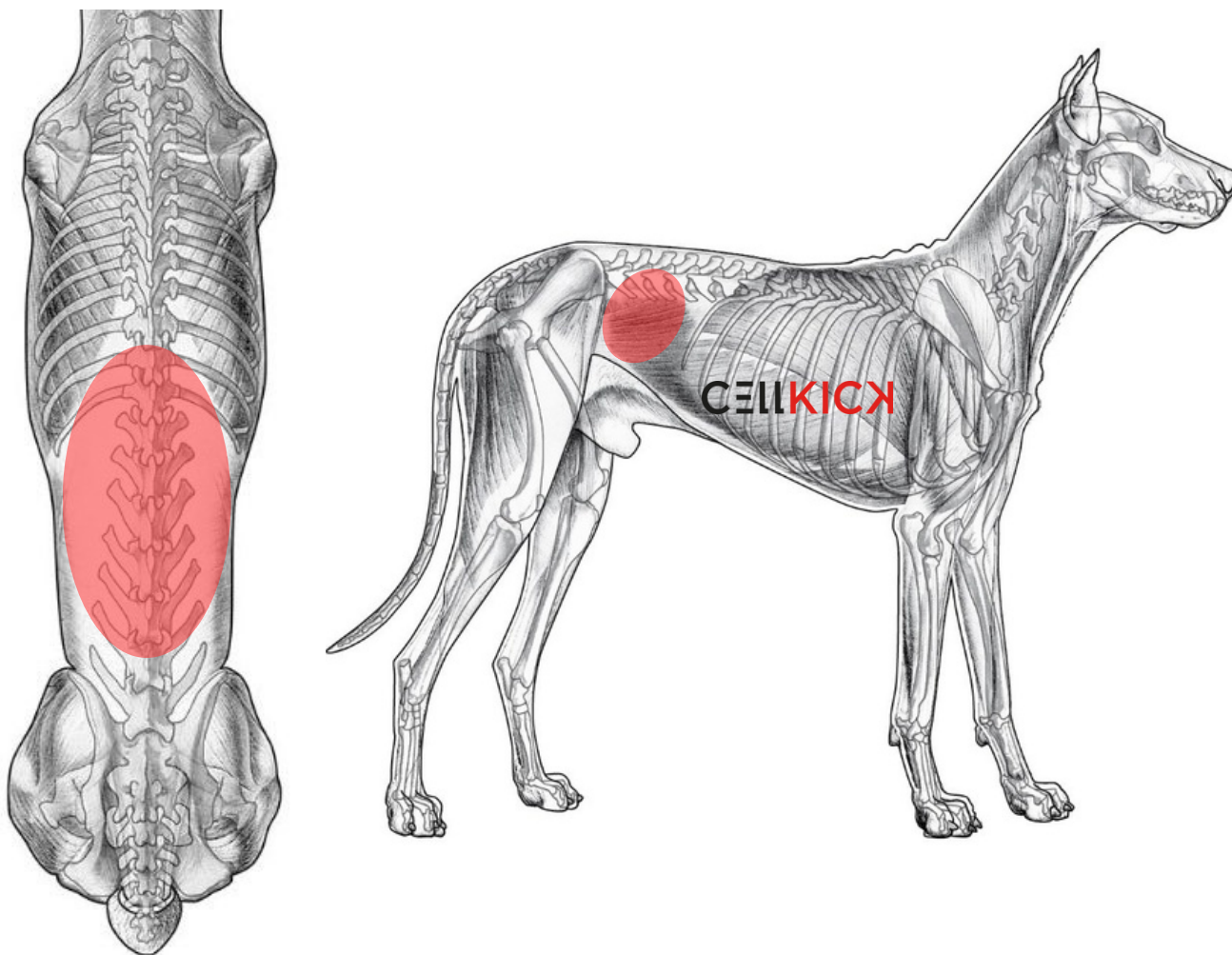


Lever

De lever helpt het lichaam onder andere met ontgiften. Na ziekte, medicijn gebruik of een stressvolle periode, kan het een goed idee zijn de lever een handje te helpen weer in de juiste frequentie te komen.

Het behandelen

Je zet de CellKick Topline op 584 Hz en plaatst de kop van de Topline op de aangegeven locatie op de afbeelding. Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer.

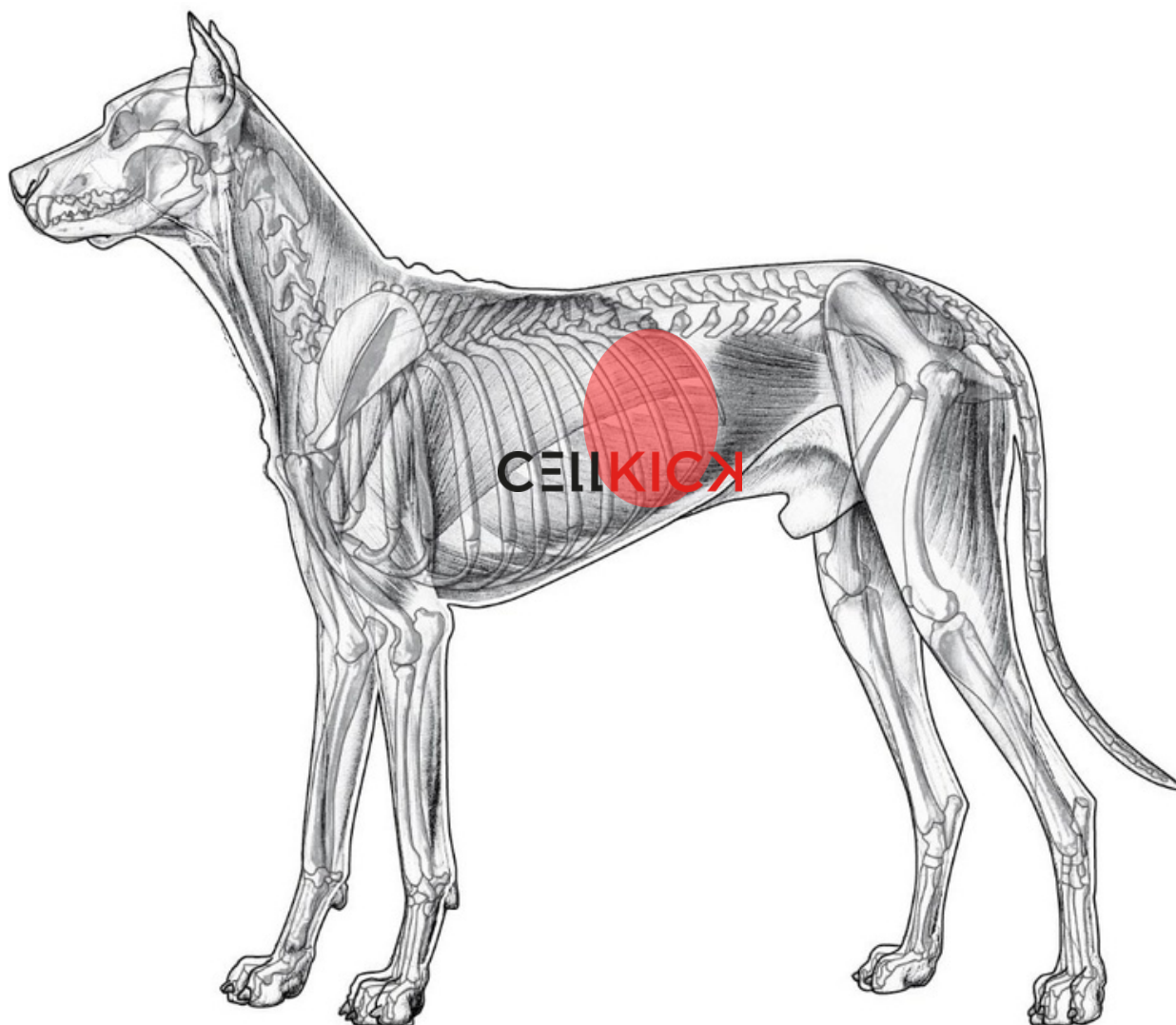


Spondylose

De CellKick Topline kun je ondersteunend inzetten wanneer de hond spondylose heeft. Het zal ervoor zorgen dat de weefsels rondom het aangedane gebied meer gaan ontspannen en er zal pijnverlichting optreden.

Het behandelen

Je zet de CellKick Topline op 1168 Hz en plaatst de kop van de Topline op het gebied waar de stijfheid en pijn zich bevindt. Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer.

LET OP: De afbeelding laat een locatie zien die veel voorkomend is bij spondylose. Dit hoeft niet de juiste locatie voor jouw hond te zijn. Na röntgenologisch onderzoek kun je de juiste locatie voor jouw hond bepalen.

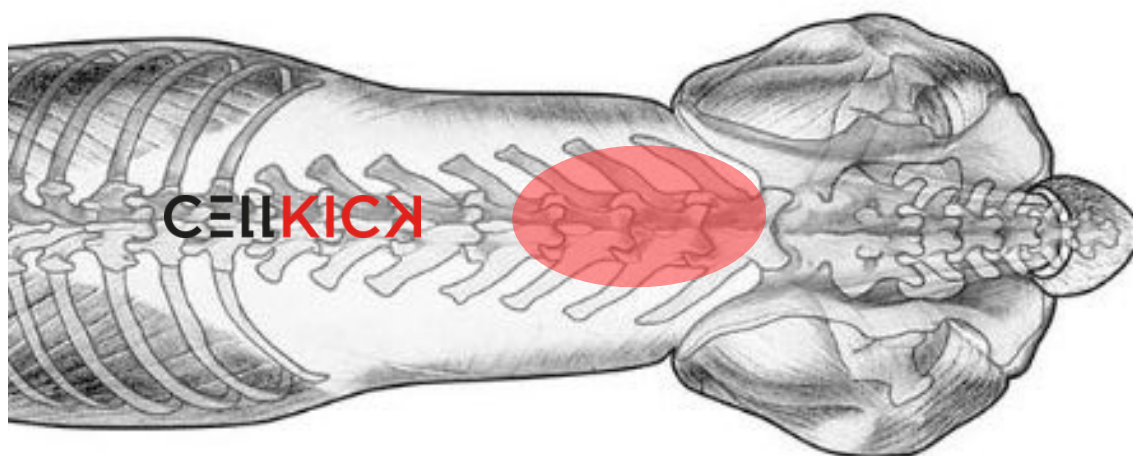


Stress

Hiermee kun je honden goed ondersteunen die veel stress ervaren. Honden die moeite hebben om rust te pakken en voornamelijk 'aan' staan. Maar ook na een stressvolle periode (zoals verhuizen, vuurwerk) om weer in balans te komen. Deze behandeling zorgt ervoor dat er meer balans komt tussen het sympathische en parasympathische zenuwstelsel.

Het behandelen

Je zet de CellKick Topline op 2336 Hz en plaatst de kop van de Topline op het achterhoofd van de hond. Dit is de locatie waar de schedel over gaat in de eerste halswervel.

Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer.

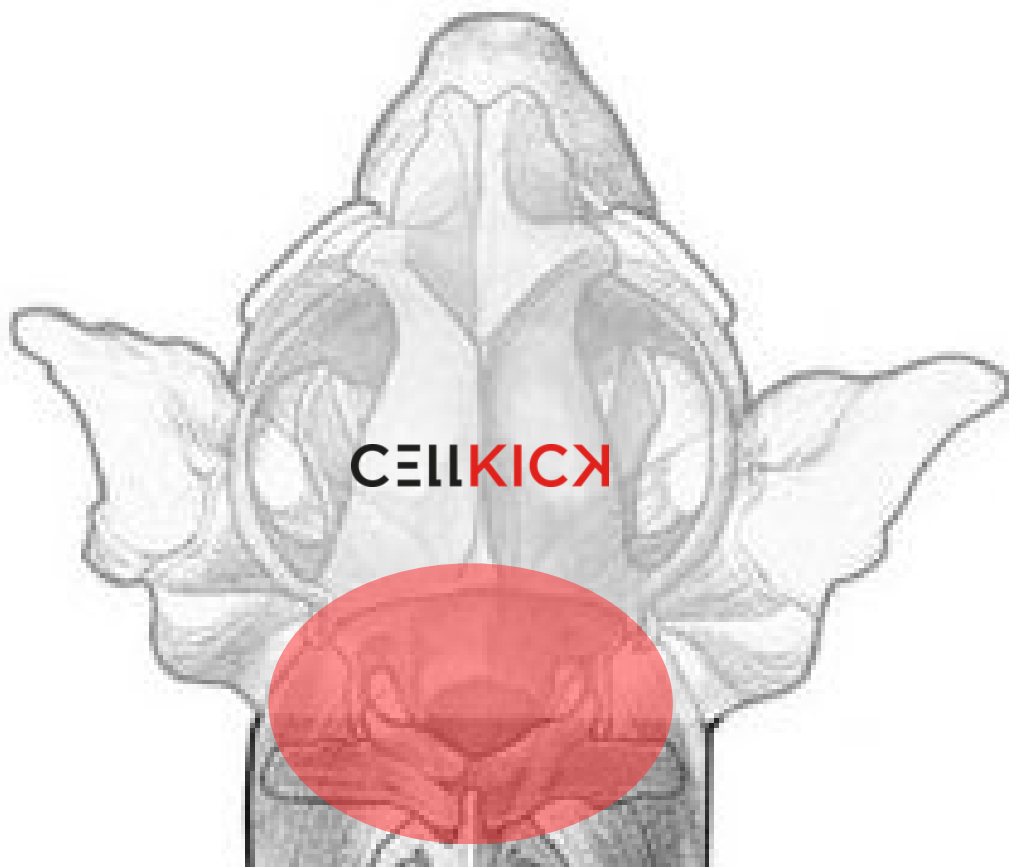

Longen


Hoesten, prikkelige longen. Sluit eerst uit of er sprake is van een allergie of ziekte. In geval van ziekte altijd de dierenarts consulteren.

De CellKick Topline kun je in zetten om de cellen weer in een gezonde frequentie te brengen.

Het behandelen

Je zet de CellKick Topline op 584 Hz en plaatst de kop van de Topline op de locaties op de afbeeldingen.

Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer, per locatie.

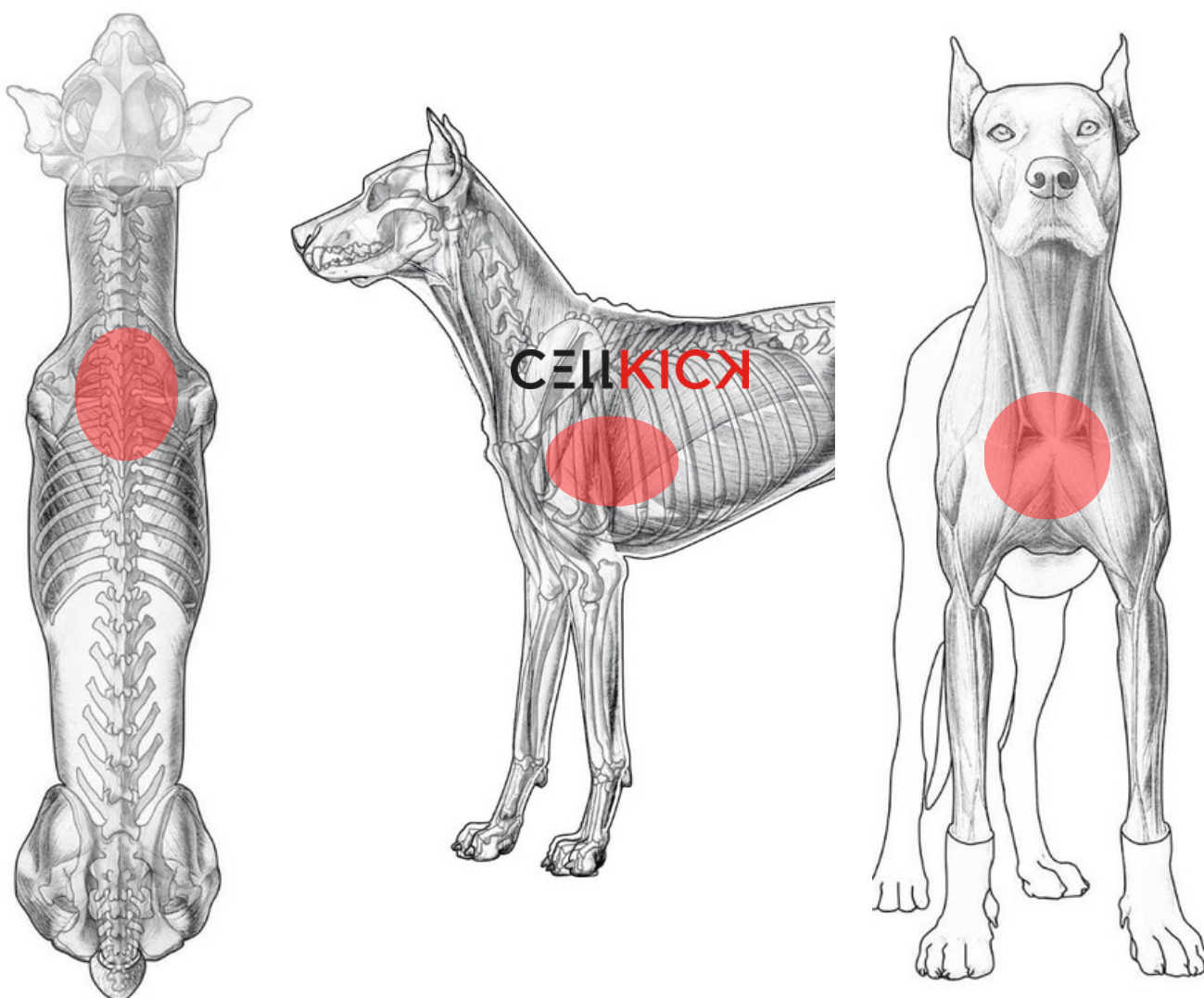

Hormoonbalans


Honden die last hebben van hormonale schommelingen kun je een handje helpen door te behandelen met de Nogier frequenties.

Het behandelen

Je zet de CellKick Topline op 73 Hz en plaatst de kop van de Topline op de locatie op de afbeelding.

Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer.

Achterhoofd. Daar waar de schedelrand overgaat in de nek.

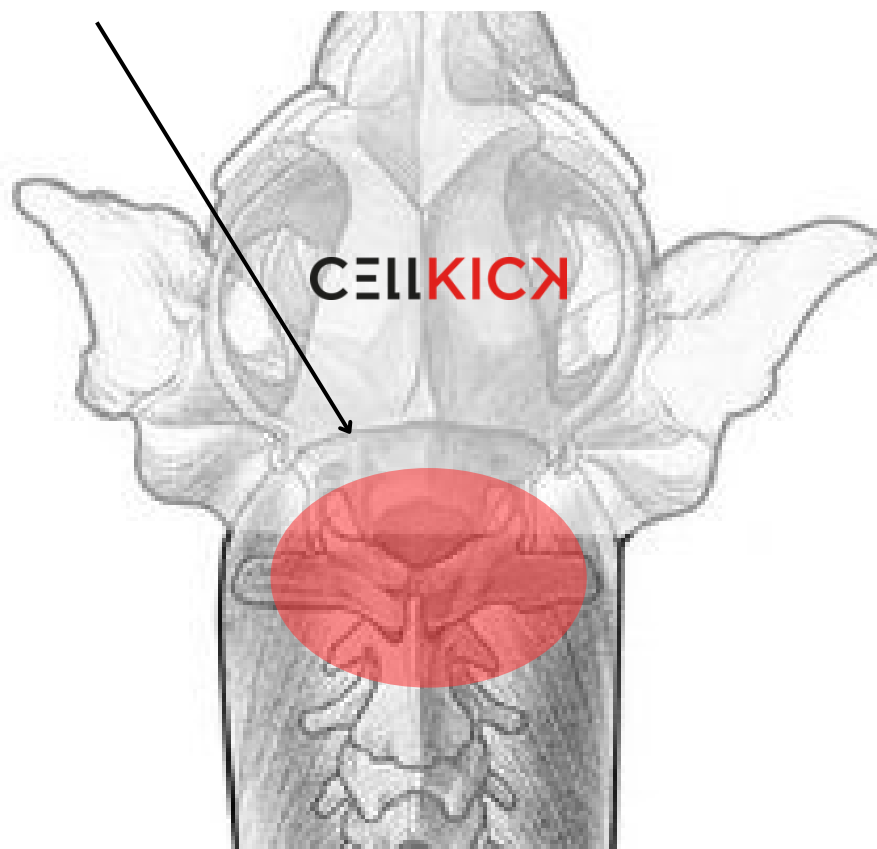

Hotspots


Wondjes die steeds weer open gelikt worden, geïrriteerd blijven, soms ook ontstoken raken, zijn heel vervelend. Je kunt deze vicieuze cirkel doorbreken met de CellKick Topline zodat de huid weer herstelt en niet meer open gelikt word.

Het behandelen

Je zet de CellKick Topline op 292 Hz en plaatst de kop van de Topline op de locatie op de afbeelding.

Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer.

LET OP: De afbeelding laat een voorbeeldlocatie zien bij hotspots. Dit hoeft niet de juiste locatie voor jouw hond te zijn. Hotspots kunnen over het hele lichaam voorkomen.

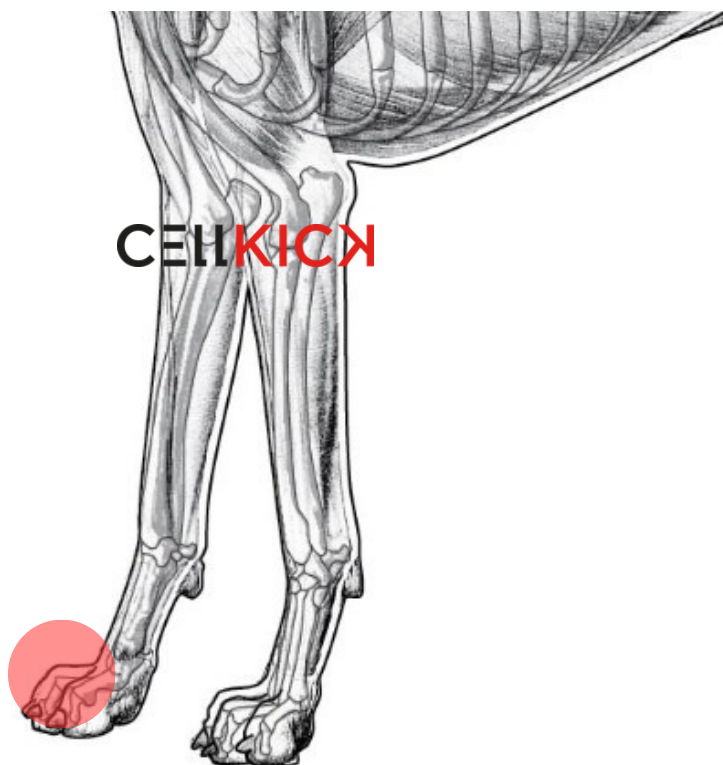


Oorontsteking

Een hond die steeds schud met zijn hoofd, kan te maken hebben met een oorontsteking. Deze is goed te behandelen met de CellKick Topline. Komt de oorontsteking steeds terug? Dan is het noodzaak om goed naar de voeding en de darmbalans te kijken.

Het behandelen

Je zet de CellKick Topline op 292 Hz en plaatst de kop van de Topline op de locatie op de afbeelding.

Dit doe je 2 tot 3 maal daags. Tot max. 5 minuten per keer.

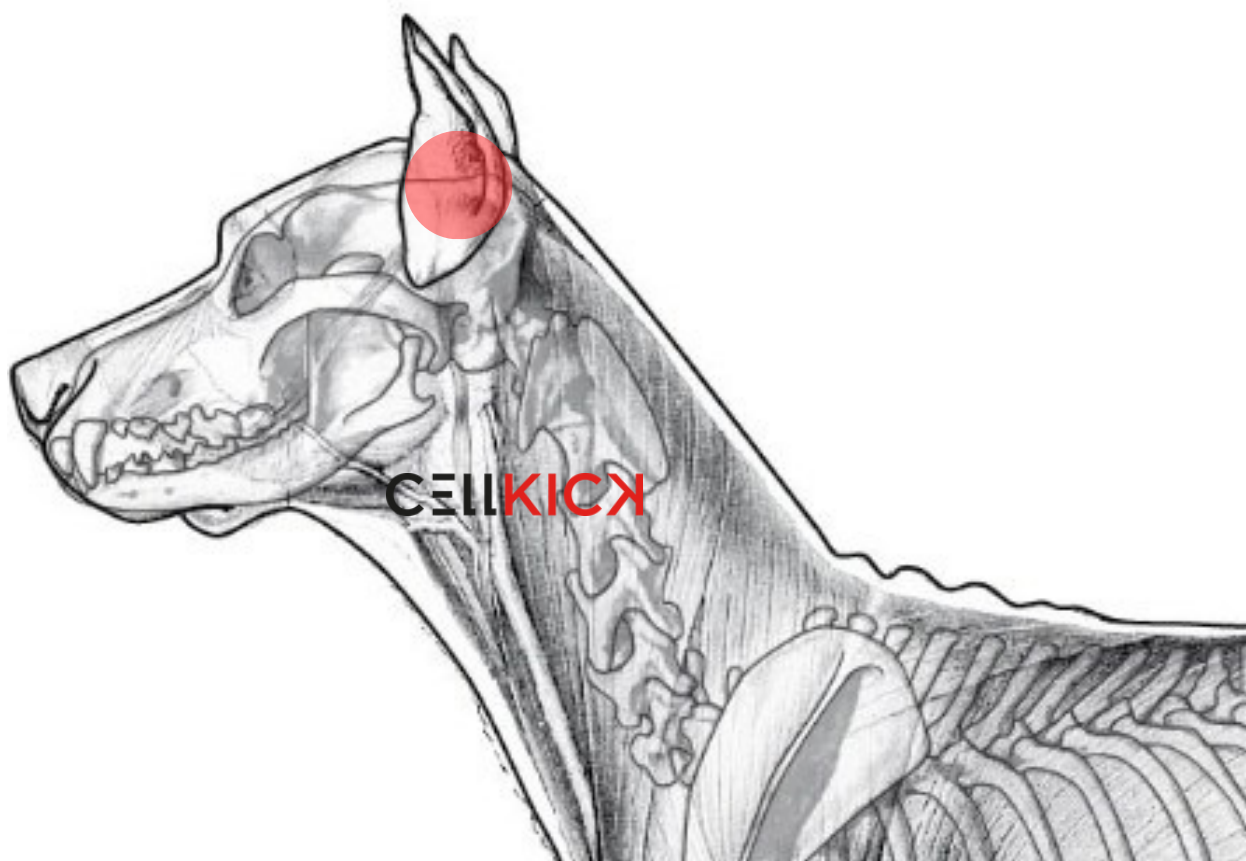

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal red lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.



www.cellkick.nl
info@cellkick.nl