

Handleiding Handheld Ultra



www.cellkick.nl
service@cellkick.nl

CELLKICK

Bedankt voor jouw aankoop!

Bedankt dat je hebt gekozen voor de CellKick Handheld Ultra!

We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt.

In deze handleiding vind je alle informatie die je nodig hebt om het maximale uit jouw nieuwe CellKick apparaat te halen, waaronder instellingen, gebruikstips, onderhoud en bewaren. Neem de tijd om alles rustig door te lezen voor een optimale gebruikservaring.

We hebben dit product met zorg samengesteld en verpakt. De volgende items behoren in de verpakking aanwezig te zijn:

- CellKick Handheld Ultra
- Beschermbril
- Oplaadsnoer
- Handleiding

We hopen dat je tevreden bent met jouw aankoop en er langdurig gebruiksgemak van ervaart.

Heb je vragen, opmerkingen of ondersteuning nodig? Ons supportteam staat voor je klaar.

Wij wensen jou en jouw dier veel comfort en plezier bij het gebruik van de CellKick Handheld Ultra!

Team CellKick

Inhoudsopgave

Vorzorgsmaatregelen	01
Wat doet de CellKick Handheld Ultra?	02
Toepassingen	03
Bediening	06
Probleemoplossingen	08
Onderhoud en bewaartips	09
Specificaties	10

CELLKICK HEEFT DEZE HANDLEIDING OPGESTELD ONDER VOORBEHOUD
VAN RECHTEN EN SLUIT ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID UIT.

Voorzorgsmaatregelen

1. Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen jonger dan 12 jaar, tenzij onder toezicht van een volwassene.
2. Richt het licht van het apparaat niet rechtstreeks in de ogen.
3. Stop het gebruik onmiddellijk indien het apparaat oververhit raakt of als het gebruik als oncomfortabel wordt ervaren.
4. Gebruik het apparaat niet op een lichtgevoelige huid of wanneer middelen worden gebruikt die de huid extra gevoelig kunnen maken voor licht.
5. Gebruik het apparaat niet bij zwangerschap, een mogelijke zwangerschap of — in het geval van dieren — dracht. Gebruik het apparaat ook niet bij onduidelijke of verdachte huidafwijkingen, bekende ernstige aandoeningen of wanneer hierover twijfel bestaat.
6. Raadpleeg een (dieren)arts of andere gekwalificeerde zorgverlener bij vragen of onzekerheid over het gebruik van dit apparaat.
7. Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van geïmplanteerde elektronische apparatuur, zoals een pacemaker, zonder voorafgaand overleg met een deskundige.

Disclaimer:

Hoewel dit product is ontworpen ter ondersteuning van de gezondheid en het welzijn, kan de werking per mens en/of dier verschillen. Elk mens en/of dier is uniek en reageert op zijn eigen manier. Daarom kunnen wij geen garanties geven over het resultaat in elke individuele situatie. Bij twijfel of aanhoudende klachten raden wij aan om een (dieren)arts te raadplegen. U bent zelf verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van uzelf en/of uw dier en het gebruik van het apparaat.

Wat doet de CellKick Handheld Ultra?

De CellKick Handheld Ultra maakt gebruik van een combinatie van verschillende lichtkleuren. Door rood, nabij-infrarood en blauw licht afzonderlijk of gecombineerd te gebruiken, kan het apparaat worden afgestemd op persoonlijke voorkeur en verschillende wellness- en verzorgingsmomenten, zoals ontspanning, comfort en huidgevoel.

Het apparaat werkt met niet-verwarmend licht en is bedoeld voor uitwendig gebruik. De ervaring kan per persoon of dier verschillen. Elke lichtkleur heeft zijn eigen karakter en toepassingsgebied:

Rood licht (630–660 nm)

Dringt door tot in de bovenste huidlagen en kan de aanmaak van collageen, celvernieuwing en bloedcirculatie stimuleren. Perfect voor ondersteuning bij huidverjonging, wondgenezing en het verminderen van oppervlakkige pijn of ontstekingen.

Nabij-infrarood licht (810–850 nm)

Nabij-infrarood licht is niet zichtbaar voor het menselijk oog en dringt dieper door in spieren en gewrichten. Het kan bijdragen; om de celstofwisseling te bevorderen, het verminderen van (chronische) pijn en het ondersteunen van herstel bij blessures, reuma, artrose of spiervermoeidheid.

Blauw licht (405–470 nm)

Werkt vooral op het huidoppervlak om de huid schoon en in balans te houden en heeft een krachtige antibacteriële werking. Het kan helpen bij acne, huidirritaties, ontstekingen en het kalmeren van een onrustige huid.

Toepassingen

Rood, nabij-infrarood en blauw licht – een natuurlijke ondersteuning

De CellKick Ultra maakt gebruik van een combinatie van verschillende lichtkleuren. Daar zit ook de kracht van dit apparaat. Door rood, infrarood en blauw licht afzonderlijk of gecombineerd te gebruiken, kan het apparaat afgestemd worden op persoonlijke voorkeur en gewenste momenten van ontspanning, verzorging of vitaliteit.

Het apparaat werkt met zacht, niet verwarmend licht en is bedoeld voor uitwendig gebruik. Elke lichtkleur heeft zijn eigen karakter en toepassingsgebied. De ervaring kan per persoon of dier verschillen.

► Rood licht, diep, warm en activerend

Rood licht staat bekend om zijn ondersteunende werking op oppervlakkige weefsels en het algemene welzijn.

Het kan worden ingezet ter ondersteuning van:

- Ontspanning van huid en spieren
- Comfort bij gevoelige of vermoeide zones
- Het natuurlijke herstelvermogen van de huid
- Doorbloeding en vitaliteit van het behandelde gebied
- Een gezonde uitstraling van de huid (huidstructuur, anti-aging)
- Afvoeren van afvalstoffen

Rood licht wordt vaak ervaren als prettig, rustgevend en activerend tegelijk.

► Nabij-infrarood licht, dieper doordringend en ontspannend

Nabij-infrarood licht dringt dieper door in het lichaam en wordt vaak gebruikt bij zones die extra ontspanning kunnen gebruiken.

Het kan ondersteuning bieden bij:

- Spanning in spieren en gewrichten
- Het bevorderen van ontspanning na fysieke inspanning
- Het loslaten van vastzittende of vermoeide gebieden
- Algemeen lichamelijk comfort
- Het ondersteunen van circulatie in diepere lagen
- Het verbeteren van mitochondriale activiteit
- Het verminderen van chronische ontstekingen

Veel mensen ervaren nabij-infrarood licht als aangenaam en verzachtend.


► Blauw licht, zuiverend, verkoelend en balancerend

Blauw licht heeft een frisse en kalmerende uitstraling en wordt vaak ingezet bij oppervlakkige toepassingen.

Het kan bijdragen aan:

- Een zuiver en fris huidgevoel
- Ondersteuning van de huidbalans
- Een kalmerende invloed op een onrustige huid
- Verzorging van gevoelige of reactieve huidzones
- Een verfrissend en verkoelend effect

Blauw licht wordt vaak gekozen bij huidverzorging en ontspanningsmomenten. De combinatie van blauw en rood licht kan helpen bij de regulering van talg productie.

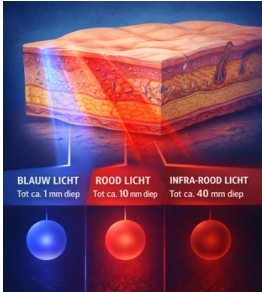


visuele vergelijking van de relatieve reikwijdte van blauw, rood en infrarood licht

Indicatie	Week	Tijd	Power	Hoe vaak	Instelling
Huid, oppervlakkig weefsel	1	1 minuut	p1	2x daags	blauw
	2	1 minuut	p2	2x daags	blauw
	3	1 minuut	p3	2x daags	blauw/rood/infrarood
Spieren, zacht weefsel	1	3 minuten	p1	2x daags	rood/infrarood
	2	4 minuten	p2	2x daags	rood/infrarood
	3	5 minuten	p3	2x daags	rood/infrarood
Gewrichten, diep liggend weefsel	1	4 minuten	p2	2x daags	rood/infrarood
	2	5 minuten	p3	2-3 x daags	rood/infrarood

Het gebruik van de CellKick Ultra is bedoeld als ondersteunende (wellness) toepassing. Het is geen vervanging voor medische zorg en geen medisch hulpmiddel. Het richt zich op comfort, ontspanning en het ondersteunen van natuurlijke processen van het lichaam. De ervaring kan per individu verschillen.



Bediening

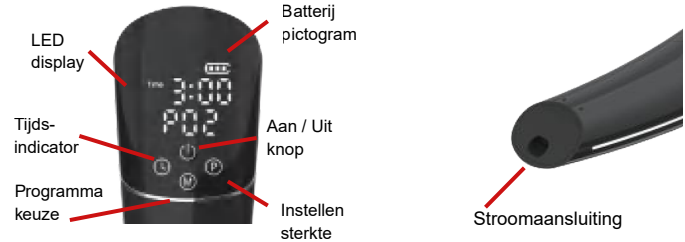

■ Aan / Uit knop:

- (1) Houdt de knop lang ingedrukt. De CellKick Ultra geeft de standaard werktijd van 3 minuten weer.
- (2) Druk nogmaals kort op de knop. De rode en nabij-infrarode lampjes gaan branden.

■ Tijdknop:

- (1) De standaard werktijd is 3 minuten.
- (2) Druk kort op de tijdknop om de tijd in te stellen. De tijd loopt op met intervallen van 30 seconden tot maximaal 5 minuten.



■ Programma keuze knop:

(1) Druk kort op de M-knop om te schakelen tussen rood + nabij-infrarood licht, blauw of rood + nabij-infrarood licht + blauw licht. Maak hier uw keuze.


■ Instellen van de sterkte (P):

(1) Druk kort op de P-knop om de sterkte aan te passen van P1 tot P3.

Opladen

Laad de batterij tijdig op wanneer het batterijpictogram op het LED-scherm bijna leeg is (één of geen streepjes meer) om de normale levensduur van de batterij te garanderen.

Steek uiteinde A van het oplaadsnoer in een daarvoor geschikte netadapter en uiteinde B van het oplaadsnoer in de stroomaansluiting van het apparaat (zie ook afbeelding op pagina 6) om op te laden. Het batterijpictogram op het LED-scherm geeft aan dat de CellKick Ultra wordt opgeladen. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, toont het batterijpictogram alle streepjes.

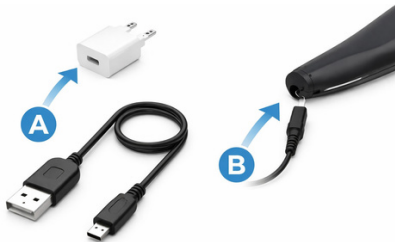

Probleemoplossingen

■ Het apparaat gaat niet aan.

- a. Houd de AAN/UIT knop 3 seconden ingedrukt.
- b. Sluit de netadapter aan om het apparaat nog 2 uur op te laden.

■ Het apparaat schakelt automatisch uit.

- a. Sluit de netadapter aan om het apparaat nog 2 uur op te laden.
- b. Laat het apparaat een paar minuten afkoelen en probeer het vervolgens opnieuw aan te zetten.

■ Het display gaat na ca 1 minuut uit tijdens het behandelen

- a. Het lichtspectrum staat gewoon aan, maar het display gaat tijdens de behandeling, na 1 minuut uit. De behandeling continueert gewoon. Indien je tussentijds op het scherm wilt kijken kun je een willekeurige knop kort indrukken zodat het LED scherm weer oplicht.

■ Sommige lampjes lijken niet te branden.

- a. Het infraroodspectrum (IR) is niet zichtbaar voor het menselijk oog. Daarom lijken deze lampjes uit te zijn, terwijl ze wel correct functioneren.

Onderhoud en bewaartips

- 1) Als het apparaat defect raakt, neem dan direct contact op met het CellKick verkooppunt waar u het apparaat heeft aangeschaft. Demonteer of repareer het apparaat niet zelf zonder toestemming.
- 2) Reinig en steriliseer de contactoppervlakken van het apparaat met een alcoholhoudend reinigingsmiddel.
- 3) Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hoge temperaturen en direct zonlicht.
- 4) Berg de CellKick Handheld altijd op in de bijgeleverde verpakkingcase of speciale CellKick Beschermkoffer, welke als accessoire verkrijgbaar is bij uw CellKick verkooppunt.
- 5) Om de levensduur van de batterij te maximaliseren, dient u deze de eerste drie keer minimaal 8 uur op te laden.
- 6) Laad de batterij, ongeacht het gebruik, minstens elke 4 tot 6 maanden op. Dit is gunstig voor het behoud van de batterij.
- 7) Bewaar de CellKick Handheld nooit in een vorstgevoelige ruimte.

Specificaties

Batterij capaciteit	1 Oplaadbare lithium-ion 1900 mAh
Rood licht	660 nm, 6 LED's
Nabij-infrarood licht	850 nm, 6 LED's
Blauw licht	410 nm, 4 LED's
LED combinaties	<ul style="list-style-type: none">• Rood + Nabij-infrarood• Blauw• Rood + Nabij-infrarood +Blauw
Power	400mW
Sterkte instelling	1-3 sterktes
Tijds instelling	1-5 minuten, ophoging per 30 sec
Display	LED scherm
Materiaal omhulsel	ABS
Lens materiaal	Getemperd glas
Oplaadsnoer	USB type C poort

Ook verkrijgbaar



Handheld Core



Handheld Topline



Rugpad



Hoefpad




Beenpad Ultimate



Beenpad Pro



Kopstuk

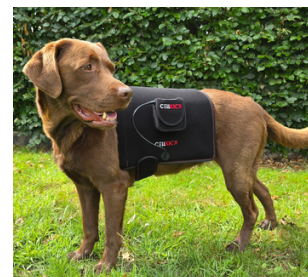

Hondenpad